

Coppetta mestruale S/M 25 ml

EAN: 769602441290

FABRICANTE: GAIA CUP



La Gaia Cup è un contenitore in silicone medico ipoallergenico al 100% che viene inserito nella vagina durante il ciclo per raccogliere il flusso mestruale.

DESCRIPCIÓN

Caratteristiche della coppetta mestruale Gaia Cup

- Realizzato con silicone medico ipoallergenico al 100%, che garantisce l'equilibrio del pH e non secca le pareti vaginali.
- Capacità da 25 a 30 ml (x3 tamponi normali). Ti protegge fino a 12 ore!
- Una Gaia Cup dura dai 7 ai 10 anni e diventa più economica degli assorbenti o dei tamponi dopo il quarto mese.
- Zero rifiuti.

GUIDA ALLE TAGLIE

Taglia S/M

Ho tra i 12 e i 30 anni e non ho avuto un parto vaginale.

Taglia L

Ho più di 30 anni e/o ho avuto un parto vaginale.

Come utilizzare la coppetta mestruale Gaia Cup?

- Prima di utilizzare Gaia Cup sterilizzarla per 3 minuti in acqua bollente e lavarsi le mani.
- Verificare che i fori di aspirazione del vuoto non siano ostruiti e piegare la ventosa nel senso della lunghezza.



Coppetta mestruale S/M 25 ml

EAN: 769602441290

FABRICANTE: GAIA CUP



- Rilassa i muscoli e inserisci la coppetta obliquamente verso il basso. Rilasciarlo in modo che si apra e aderisca alle pareti vaginali.
- Dopo 5-12 ore (a seconda del flusso), rimuovi la coppetta. Tira la maniglia, puoi usare i muscoli della vagina per premerla ed espellerla.
- Versare il contenuto della tazza nel wc, sciacquarla con acqua e sostituirla.

