

## MASCHERA NERA FFP2 N. 2 UNITÀ

**EAN:** 8425402731888 **FABRICANTE:** TEELMASK



*Mascherina FFP2. Colore nero. Adatto per aiutare a proteggere da COVID19 e Monkeypox. Maschera filtrante. Composizione: 100% Polipropilene. protezione respiratoria contro particelle, aerosol solidi e liquidi. 2 unità in ogni contenitore di carta.*

### DESCRIPCIÓN

Questa maschera è realizzata con 4 strati di tessuto non tessuto:

- Strato esterno: polipropilene spunbond
- Secondo strato: polipropilene meltblown
- Terzo strato: Spunlace in polipropilene idrofobo
- Strato interno: polipropilene spunbond

Ha 1 clip per naso in metallo largo 5 mm e lungo 88 mm.

Non è dotato di valvola di espirazione.

Presenta su ciascun lato una fascia elastica priva di lattice, lunga 165 mm.

Il tasso minimo di filtrazione delle particelle è del 95%

Ha una bassa resistenza all'inalazione, poiché la sua azione è meccanica ed elettrostatica.

La data di scadenza è di 2 anni dalla data di produzione stampata sulla confezione.

Conforme alla norma europea armonizzata EN 149:2001+A1:2009.

CE0370.

### Come usare:

1. Apri il sacchetto di carta ed estrai la maschera.
2. Posiziona la maschera sul viso, coprendo completamente naso e bocca. La clip per il naso dovrebbe poggiare sul naso.
3. Tieni la maschera con una mano sul mento. Tirare il nastro e posizionarlo dietro l'orecchio.
4. Adatta la clip al naso con entrambe le mani e assicurati che i bordi della maschera siano a diretto contatto con il viso.
5. Effettua un test di tenuta per verificare di aver indossato correttamente la maschera. Coprire la maschera con entrambe le mani ed espirare con forza. Se noti perdite dai bordi, riposiziona la maschera sul viso, regola nuovamente la clip per il naso o regola la tensione delle cinghie. Ripetere questo processo finché non viene rilevata alcuna perdita.



## MASCHERA NERA FFP2 N. 2 UNITÀ

**EAN:** 8425402731888    **FABRICANTE:** TEELMASK



---

### Attenzione:

- L'attrezzatura NR non deve essere utilizzata per più di un turno di lavoro. Massimo 8 ore.
- Utilizzare secondo le raccomandazioni del produttore, seguendo le istruzioni sull'etichetta.
- Questo non è un prodotto medico. Non sterile.
- Queste maschere non forniscono ossigeno.

### Attenzione:

- Non utilizzare in atmosfere con bassa concentrazione di ossigeno o aree scarsamente ventilate.
- La presenza di particolari tratti del viso, capelli abbondanti o occhiali possono impedire una corretta vestibilità della maschera.
- Tenere lontano da fonti di calore.

Prodotto fabbricato in Spagna.

