

## Copa Menstrual L 30 ml

EAN: 786071099531

FABRICANTE: GAIA CUP



*La Gaia Cup és un recipient fet de silicona mèdica 100% hipoal·lergènica que s'insereix a la vagina durant el període per recol·lectar el flux menstrual.*

### DESCRIPCIÓ

#### Característiques de la Copa menstrual Gaia Cup

- Fabricada amb silicona mèdica 100% hipoal·lergènica, cosa que garanteix l'equilibri de pH i no resseca les parets vaginals.
- Capacitat de 25 a 30 ml (x3 tampons regulars). Et protegeix fins a 12 hores!
- Una Gaia Cup dura entre 7 i 10 anys i es converteix en més econòmic que les compreses o els tampons a partir del quart mes.
- Zero residus.

### GUIA DE TALLES

Grandària S/M

Tinc entre 12 i 30 anys i no he tingut un part vaginal.

Talla L

Sóc més gran de 30 anys i/o he tingut un part vaginal.

### Com utilitzar la copa menstrual Gaia Cup?

- Abans de fer servir la Gaia Cup esterilitza-la durant 3 minuts en aigua bullint i renta't les mans.
- Comproveu que els forats de succió per a efecte buit no estan obstruïts i doblega la copa longitudinalment.



## Copa Menstrual L 30 ml

EAN: 786071099531

FABRICANTE: GAIA CUP



- Relaxa els músculs i introdueix la copa obliquament cap al fons. Deixeu-la anar perquè s'obri i s'adhereixi a les parets vaginals.
- Després de 5-12 hores (segons el teu flux), retira la copa. Tira del tirador, pots fer servir els músculs de la vagina per pressionar-la i expulsar-la.
- Aboca el contingut de la copa al WC, esbandeix-la amb aigua i torna a col·locar-la.

