

Copa Menstrual Gran

EAN: 8437009517956 FABRICANTE: GENUINE



La copa menstrual Genuine està fabricada íntegrament en silicona sanitària, per la qual cosa és totalment hipoal·lergènica i s'adapta per complet a la teva anatomia, de manera que et proporciona fins a 12 hores de màxima protecció sense molèsties i sense notar que la portes. emprar, et permet realitzar esport, fins i tot natació amb ella posada.

DESCRIPCIÓ

Talla 1 Petita (S): dones que no han donat a llum de forma vaginal

Talla 2 Gran (M): dones que han donat a llum de forma vaginal.

Instruccions d'ús

Com es fa servir la copa menstrual?

Esterilitzar les copes abans i després de cada menstruació. Rentar-se amb cura les mans per evitar infeccions ja que les copes s'insereixen a l'interior de la vagina. Doblegar la copa i introduir-la. Es pot fer asseguda, dempeus, gatxoneta o de genolls. Més avall es mostren les dues possibilitats en què es pot doblegar per facilitar la inserció. Retirar-la en un màxim de 8-12 hores, buidar-ne el contingut i netejar-la en aigua. Tornar a introduir la copa.

Què és una copa menstrual?

Per a totes les dones que volen una vida molt més... CÒMODA - SEGURA - MODERNA - SIMPLE - ECOLÒGICA - ECONÒMICA - HIGIÈNICAL copa menstrual és un recipient de silicona mèdica que s'introdueix a l'interior de la vagina (igual que un tampó) durant la menstruació, adaptant-se a les parets vaginals en tot moment independentment del moviment que fem, i arreplega tot el flux a l'interior de la copa. Pots portar la copa fins a 12h a l'interior sense preocupar-te (en funció del flux que tinguis). I té un ús il·limitat, ja que la pots treure i posar tantes vegades com vulguis. S'utilitza diàriament durant tot el cicle. Sí, sí TOT el cicle, per la qual cosa la pots fer servir a la nit sense problemes, pots dormir tranquil·lament i plàcidament. de per vida els tampons, les compreses, els salvaslips, les olors, les taques, les pèrdues, les preocupacions...

