

## Tiras de teste 25 unidades

EAN: 8425402  
247761

FABRICANTE: ALKANATUR



Conjunto de 25 tiras para medição de pH.

### DESCRIPCIÓN

#### Tiras de teste de pH corporal

25 unidades

Recomenda **-se medir o pH seja pela urina ou pela saliva, sempre com o estômago vazio** e o ideal é fazer dois ou três dias seguidos e tirar a média.

Recomenda-se mergulhar a tira-teste por apenas 15 segundos, seja na saliva ou na urina, e comparar com a escala de cores que vem na caixa da tira-teste. A cor que mais se aproxima da escala de cores na caixa é a medida real.

O **valor de pH ideal seria entre 6,75 e 7,25 na urina e entre 7,0 e 7,5 na saliva** .

#### escala de cores:

