

## Copo Menstrual L 30 ml

EAN: 786071099531

FABRICANTE: GAIA CUP



*O Gaia Cup é um recipiente feito de silicone médico 100% hipoalergênico que é inserido na vagina durante a menstruação para coletar o fluxo menstrual.*

### DESCRIPCIÓN

#### Características do Copo Menstrual Gaia Cup

- Fabricado com silicone médico 100% hipoalergênico, que garante equilíbrio do pH e não resseca as paredes vaginais.
- Capacidade de 25 a 30 ml (x3 tampões normais). Protege você por até 12 horas
- O Gaia Cup dura entre 7 e 10 anos e fica mais barato que absorventes ou absorventes internos após o quarto mês.
- Desperdício Zero.

### GUIA DE TAMANHO

Tamanho S/M

Tenho entre 12 e 30 anos e não tive parto vaginal.

Tamanho L

Tenho mais de 30 anos e/ou tive parto vaginal.

### Como usar o copo menstrual Gaia Cup?

- Antes de utilizar o Gaia Cup, esterilize-o por 3 minutos em água fervente e lave as mãos.
- Verifique se os orifícios de sucção a vácuo não estão bloqueados e dobre o copo longitudinalmente.
- Relaxe os músculos e insira o copo obliquamente em direção ao fundo. Solte-o para que se abra e



## Copo Menstrual L 30 ml

EAN: 786071099531

FABRICANTE: GAIA CUP



adira às paredes vaginais.

- Após 5-12 horas (dependendo do fluxo), retire o copo. Puxe a alça, você pode usar os músculos da vagina para pressioná-la e expulsá-la.
- Despeje o conteúdo do copo no vaso sanitário, enxágue com água e recoloque.

