



Den äkta menskoppen är helt gjord av sanitetssilikon, så den är helt hypoallergen och anpassar sig helt efter din anatomi, så att den ger dig upp till 12 timmars maximalt skydd utan obehag och utan att du märker att du har den på dig lätt att använda, den låter dig sporta, även simma med den på.

DESCRIPCIÓN

Storlek 1 Small (S): kvinnor som inte har fött barn vaginalt

Storlek 2 Large (M): kvinnor som har fött barn vaginalt.

Användningsinstruktioner

Hur använder du menskoppen?

Sterilisera kopparna före och efter varje menstruation. Tvätta händerna noggrant för att undvika infektioner eftersom kopparna sätts in i slidan. Det kan göras sittande, stående, på huk eller på knä. Nedan finns de två möjligheter där den kan vikas för att underlätta insättningen.

Vad är en menskopp?

För alla kvinnor som vill ha ett mycket mer liv...BEKVÄM - SÄKER - MODERN - ENKEL - EKOLOGISK - EKONOMI - HYGIEN Menskoppen är en medicinsk silikonbehållare som sätts in i slidan (precis som en tampong) för menstruation, anpassad till slidväggarna hela tiden oavsett vilken rörelse vi gör, och samlar upp allt flöde inuti koppen. Du kan bära koppen inuti i upp till 12 timmar utan att behöva oroa dig (beroende på ditt flöde). Och den har obegränsad användning, eftersom du kan ta bort den och sätta på den så många gånger du vill. Den används dagligen under hela cykeln. Ja, ja HELA cykeln, så du kan använda den på natten utan problem, du kan sova lugnt och fridfullt. Sedan steriliserar du den bara med kokande vatten och håller den i sin bomullspåse tills din nästa menstruation liv tamponger, bindor, trosskydd, lukter, fläckar, förluster, bekymmer...

