

## Organic Care menskopp storlek M

EAN: 8432984001131 FABRICANTE: MASMI



Menskoppen är ett naturligt alternativ till användning av tamponger och bindor. Dess funktion är att samla upp vätskan från din mens och dess applicering är mycket lik tamponger.

### DESCRIPCIÓN

#### Vad kännetecknar Masmi menskoppar?

- Rundade kanter för smidig insättning och borttagning.
- Patenterat system av koniskt formade sughål: de förhindrar läckor och underlättar vakuumutsug och rengöring.
- Koppbotten med halkfri avlastning.
- Specialformat utsugshandtag som gör den lätt att hålla

#### Varför använda masmi menskopp?

- Bekvämt. Du kommer inte märka att du har den på dig och du kan använda den för dag, natt och sport.
- Återanvändbar och återvinningsbar.
- Skydd upp till 12 timmar. Du kan bära menskoppen i upp till 12 timmar innan du tömmer den, alltid beroende på ditt flöde.
- Tillverkad med TPE av medicinsk kvalitet.
- Hypoallergen.

Tillverkad utan silikon, latex, BPA och ftalater.

#### Hur placerar man menskoppen?

Menskoppen kan verka komplicerad till en början, men vi rekommenderar att du tar dig tid att lära dig. Det är viktigt att öva på korrekt insättning och borttagning, men när du väl har fulländat tekniken kommer du att tycka att det är ett mycket enkelt och bekvämt alternativ.

- Tvätta händerna väl och sätt dig i en bekväm position.
- Det är dags att vika ihop koppen. Det finns 2 alternativ:



## Organic Care menskopp storlek M

EAN: 8432984001131    FABRICANTE: MASMI



- A** ? Tryck ihop glasets sidor och vik sedan glaset på mitten för att bilda en U-form.  
**B** ? Placera ett finger på den övre kanten av koppen och tryck inåt för att bilda en triangel.

- Vik ihop koppen och håll den med ena handen, separera slidläpparna med den andra och för in koppen mot svanskotan eller ryggradens bas.
- För att kontrollera att glaset är korrekt placerat, vrid det 360° och håll det i basen (ovanför handtaget). Bägaren ska rotera helt lätt om den är rätt placerad.

### Hur kan jag veta min storlek?

Att få rätt storlek på menskoppen är något som oroar de som provar det för första gången, men att hitta den är det enklaste i världen! Masmi menskopp finns i 3 storlekar som anpassar sig till kvinnors olika stadier:

#### • Menskopp storlek S

För kvinnor under 18 år och som inte regelbundet har sexuella relationer.

- Kapacitet: 17 ml.
- Diameter: 40 mm.
- Total längd: 63 mm.

#### • Menskopp storlek M

För kvinnor under 25 år som inte har fått barn genom vaginal förlossning.

- Kapacitet: 25 ml.
- Diameter: 43 mm.
- Total längd: 67 mm.

#### • Menskopp storlek L

För kvinnor över 25 år eller som har fått barn genom vaginal förlossning.

- Kapacitet: 30 ml.



## Organic Care menskopp storlek M

**EAN:** 8432984001131    **FABRICANTE:** MASMI



- 
- Diameter: 46 mm.
  - Total längd: 67 mm.

