

## Copa Menstrual Organic Care Talla L

EAN: 8432984001148    FABRICANTE: MASMI



La copa menstrual es una alternativa natural al uso de tampones y compresas. Su función es la de recoger el fluido de tu periodo y su aplicación es muy similar a la de los tampones.

### DESCRIPCIÓN

#### ¿Cuáles son las características de las copas menstruales Masmi?

- Bordes redondeados para una colocación y extracción suave.
- Sistema patentado de orificios de succión con forma cónica: previenen los escapes y facilitan el vacío para su extracción y su limpieza.
- Base de la copa con relieve antideslizante.
- Tirador de extracción con forma especial que facilita su sujeción

#### ¿Por qué utilizar la copa menstrual masmi?

- Cómoda. No notarás que la llevas y puedes utilizarla para el día, la noche y para hacer deporte.
- Reutilizable y Reciclable.
- Protección hasta 12h. Puedes llevar la copa menstrual hasta un máximo de 12h antes de vaciarla, siempre dependiendo de tu flujo.
- Fabricada con TPE de Grado Médico.
- Hipoalergénica.

Fabricada sin silicona, látex, BPA y ftalatos.

#### ¿Cómo colocar la copa menstrual?

La copa menstrual puede parecer complicada al principio, pero te recomendamos tomarte el tiempo necesario para aprender. Practicar la inserción y extracción adecuadas es fundamental, pero una vez perfecciones la técnica, encontrarás que es una opción muy fácil y cómoda.



## Copa Menstrual Organic Care Talla L

**EAN:** 8432984001148    **FABRICANTE:** MASMI



- Lávate bien las manos y adopta una posición cómoda.
- Es momento de hacer el pliegue a la copa. Hay 2 opciones:

- A** - Presiona los lados de la copa hasta juntarlos y luego dobla la copa por la mitad formando una 'U'.  
**B** - Coloca un dedo sobre el borde superior de la copa y presiona hacia adentro para formar un triángulo.

- Dobla la copa y sujétala con una mano, con la otra mano separa los labios vaginales e introduce la copa en dirección al coxis o base de la columna vertebral.
- Para comprobar que la copa ha quedado bien colocada gírala 360º cogiéndola por la base (encima del tirador). La copa debe girar completamente con facilidad si está bien colocada.

### ¿Cómo puedo saber mi talla?

Acertar la talla de la copa menstrual es algo que preocupa a quienes la prueban por primera vez, pero dar con ella ¡es lo más fácil de mundo! La copa menstrual Masmi está disponible en 3 tallas que se adaptan a las diferentes etapas de la mujer:

#### • Copa menstrual talla S

Para mujeres menores de 18 años y que no mantienen relaciones sexuales habitualmente.

- Capacidad: 17 ml.
- Diámetro: 40 mm.
- Longitud total: 63 mm.

#### • Copa menstrual talla M

Para mujeres menores de 25 años que no han tenido hijos por parto vaginal.



## Copa Menstrual Organic Care Talla L

**EAN:** 8432984001148 **FABRICANTE:** MASMI



- Capacidad: 25 ml.
- Diámetro: 43 mm.
- Longitud total: 67 mm.

- **Copa menstrual talla L**

Para mujeres mayores de 25 años o que han tenido hijos por parto vaginal.

- Capacidad: 30 ml.
- Diámetro: 46 mm.
- Longitud total: 67 mm.

