

Copa Menstrual Femicup n 2 talla M

EAN: 8437009881989 **FABRICANTE:** SILVESTRE



Femicup, es una copa menstrual que ha nacido para ser la alternativa natural y sana de compresas y tampones, además de ser ecológico al no producir residuos tras el periodo de uso.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es FemiCup?

Femicup, es una copa menstrual que ha nacido para ser la alternativa natural y sana de compresas y tampones, además de ser ecológico al no producir residuos tras el periodo de uso.

La copa menstrual FEMICUP es una alternativa fácil, segura, ecológica y económica al uso de tampones. Dura hasta 7 años. Hecha de silicona 100% médica. Es hipoalérgica y puede ser utilizada por todas las mujeres.

La manera de usar Femicup es sencilla: se introduce la Femicup durante los días de flujo. No impregna, solo retiene en su interior para después ser eliminarlo. No afecta la mucosa, ni deja ningún tipo de residuo tras su uso que pueda alterar al sistema urinario.

Las copas menstruales se utilizan desde hace más de 75 años y nunca ha sido asociada con casos de síndrome de shock tóxico (TSS).

FemiCup es ahorro, limpieza y comodidad.

Estas son algunas de sus ventajas de Femicup copa menstrual

- Ahorra dinero.
- La FemiCup garantiza su uso perfecto durante, al menos, 5 años. Imagine todo el ahorro que supone comprar compresas y tampones durante ese tiempo.
- Fácil uso. Puede usar femicup en cualquier sitio cuando te sea necesario, ya que una vez introducida, deja de ser visible totalmente.
- Sana.
- Evita la sequedad y candidíasis. El uso habitual de copa menstrual Femicup tiene efectos beneficiosos para la salud al prevenir la sequedad asociada a los tampones.



Copa Menstrual Femicup n 2 talla M

EAN: 8437009881989

FABRICANTE: SILVESTRE



Cómo usar Femicup copa menstrual

- Antes del primer uso, esterilizar la copa en agua hirviendo durante 2-3 minutos.
- Antes de la manipulación de la copa FEMICUP, lavar las manos cuidadosamente. Para facilitar la inserción, lubrique con agua o lubricante a base de agua.
- Doble la copa para reducir el volumen, y oriente con la abertura hacia arriba en dirección a su vagina. Puede introducirla sentada, de pie o de cuclillas.
- Sus músculos internos mantendrán la copa FEMICUP en la posición correcta, encontrará la posición adecuada practicando y conociendo su anatomía. A diferencia del tampón, la copa se mantiene en la parte inferior de la vagina, no tan abajo para resultar incómodo, ni siquiera sentada.
- Para ajustar la copa en el interior, gírela con cuidado o pase un dedo alrededor de ella.
- Inclinar la vagina hacia atrás, por lo que sólo empujar de nuevo la copa y moverla hacia arriba y hacia abajo le ayudará a encontrar la posición correcta

Durante el período

- Limpiar las manos antes de retirar la copa. Si no consigue cogerla en su totalidad, tire cuidadosamente del apéndice y presione la parte inferior para romper el vacío, doblándola igual que al insertarla. No intentar tirar solamente del apéndice.
- Vaciar la copa 2-4 veces por día. Se puede utilizar por la noche, pero no más de 12 horas seguidas.
- No es necesario quitarse la copa al ir al baño, pero si que es recomendable comprobar su posición tras hacer sus necesidades.
- Si la copa FEMICUP está en la parte superior de la vagina, relaje los músculos y trate de coger con los dedos. En cuclillas se deslizará más fácilmente.
- Vierta el contenido en la taza del baño. Lave la copa con agua caliente y jabón y volver a insertar. Use un jabón suave y sin alcohol.

Después del periodo

Precios válidos salvo cambios en nuestra web. IVA incluido. Doc. Version bf-trf-G-20241121
<https://bio-farma.es/parafarmacia/ff/silvestre/copa-menstrual-femicup-n-2-talla-m>





Copa Menstrual Femicup n 2 talla M

EAN: 8437009881989

FABRICANTE: SILVESTRE



- Lavar a fondo la copa después de la última utilización del periodo. Esterilizar en agua a hervir durante 2-3 minutos.
- Mantenga la copa FEMICUP dentro de su bolsa en un lugar ventilado. No guarde en recipiente hermético ni bolsa de plástico.

Precios válidos salvo cambios en nuestra web. IVA incluido. Doc. Version bf-trf-G-20241121
<https://bio-farma.es/parafarmacia/f/silvestre/copa-menstrual-femicup-n-2-talla-m>

<https://bio-farma.es> - info@bio-farma.es

C/ Vermell, 20 3r 3a - 17252
St. Antoni de Calonge (Girona) Spain



+34 696 79 77 77

